



V31/V33系列病房门口机 使用手册

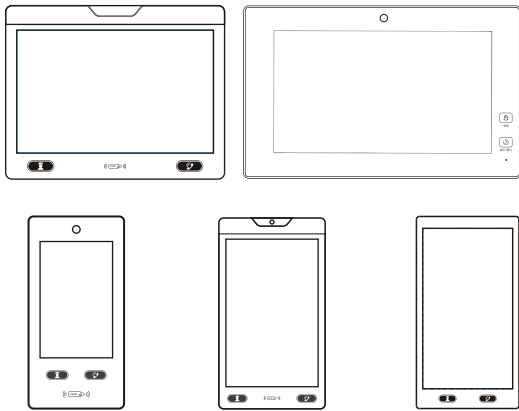


欢迎选用我公司的病房门口机产品！

BC210SL10/BC2202L10-D/BC2223L10-D/ BC2221L10-V/D /BC2221L10-D/BC222AL16-D/BC222AL16-DM/BC2201L10-V
采用当今最先进的电子通信技术设计,以优良的SMT工艺生产,经过严格的质量保证体系的测试与检验,具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点,为值得信赖的病房门口机产品。

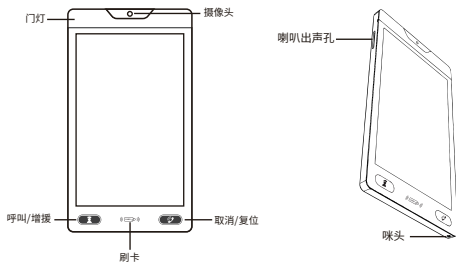

(BC2223L10-D)

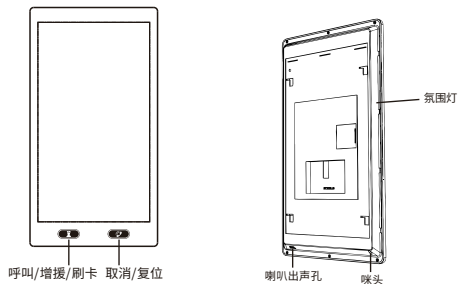


(BC222AL16-D/BC222AL16-DM)


装箱清单 (表中配件可能根据型号不同而有所增减)

序号	名称	数量	
1	病房门口机	1台	
2	说明书	1本	
3	合格证	1张	
4	配件包	1套	配件包单独包装,内含:挂板、电源线、电源适配器、配线等。不同型号产品配件包可能有所不同,以实物为准。


一、产品简介

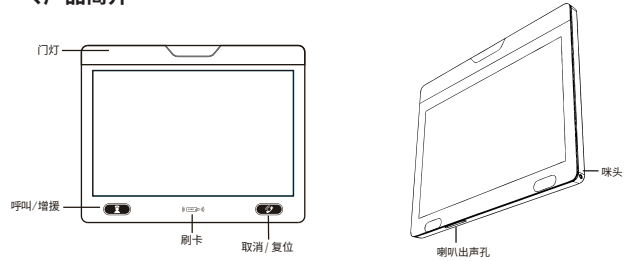


(BC2202L10-D)

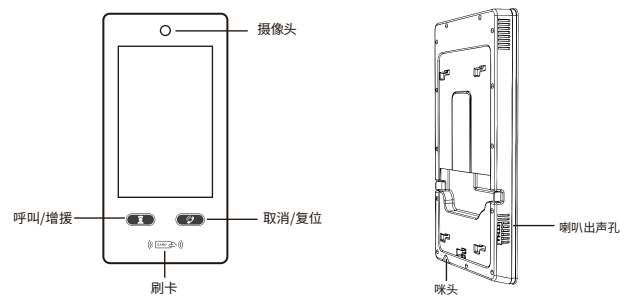

(BC2221L10-V/D BC2221L10-D)

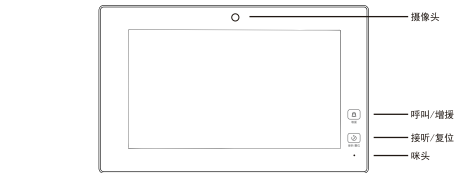

(BC2201L10-V)

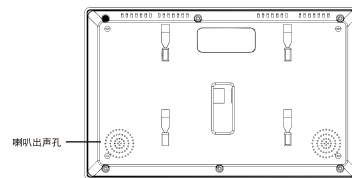

二、号码设置


进入病房号设置功能,正确输入该病房门口机的号码,按确认键系统提示设置成功并自动重启。

如果输入号码不在房号表中,则系统显示“号码不存在”;如果号码没改变,则系统显示“设备号码无修改”。

温馨提示:房号要根据房号表填写,每台病房门口机设备都会分配一个固定IP,且设备IP都不相同,设置正确的房号后系统将自动更改设备IP地址。

三、安装说明


BC2202L10-D病房门口机安装说明

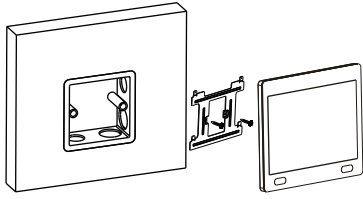

一、设备安装

- 1.用两个螺丝将挂板打在墙上的86盒上
- 2.将设备后盖卡扣位对准挂板的挂钩后往下拉即可安装完毕

BC2221L10-V/D BC2221L10-D病房门口机安装说明

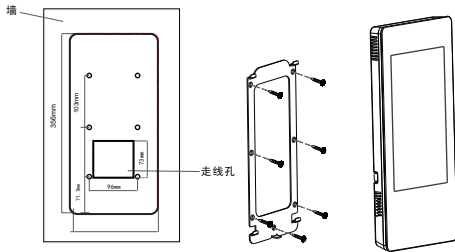

一、墙面开孔

- 1.按照图纸尺寸在墙面上开孔


二、安装病房门口机挂板

- 1.将6颗塑料膨胀胶塞塞进圆孔中
- 2.将挂板用6颗M4自攻螺丝安装固定在墙面上

三、安装病房门口机

- 1.将线槽的网线,电源线等功能线接口插到病房门口机上
- 2.将病房门口机对准挂板的卡扣位后往右推再往下然后轻轻右推(取设备时先往右推后往上推再往左推)
- 3.最后在设备底部安装1颗M4的机制螺丝


BC2202L10-D病房门口机安装说明

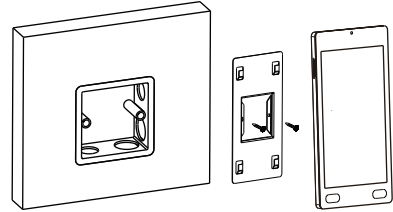

一、设备安装

- 1.用两个螺丝将挂板打在墙上的86盒上
- 2.将设备后盖卡扣位对准挂板的挂钩后往下拉即可安装完毕

BC222AL16-D BC222AL16-DM病房门口机安装说明

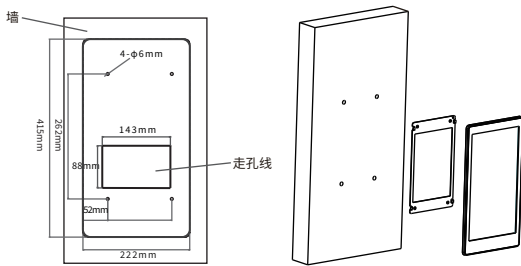

一、墙面开孔

- 1.按照图纸尺寸在墙面上开孔


二、安装病房门口机挂板

- 1.将4颗塑料膨胀胶塞塞进圆孔中
- 2.将挂板用4颗M4自攻螺丝安装固定在墙面上

三、安装病房门口机

- 1.将线槽的网线,电源线等功能线接口插到病房门口机上
- 2.将病房门口机对准挂板的卡扣位先向下推后往左推即可安装完毕(取设备时先向右推后向上推)


BC2201L10-V病房门口机安装说明

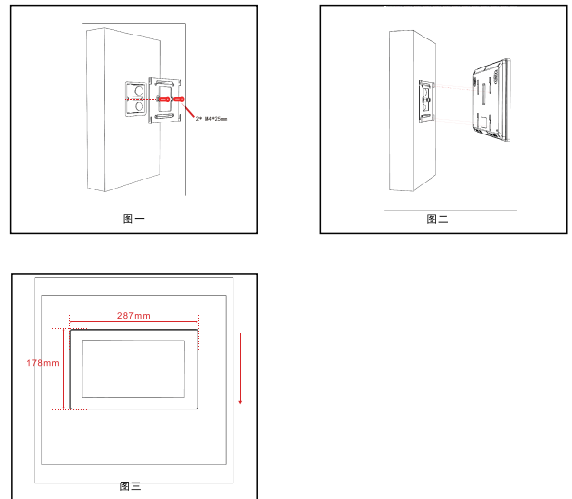


一、安装设备(图一-图三)

- 1.将2颗M4*25mm的螺丝将挂板固定在86盒上
- 2.将设备后盖的安装孔对准挂板挂钩后扣上,并往下拉即可固定设备,拆卸则相反


四、接口接线说明

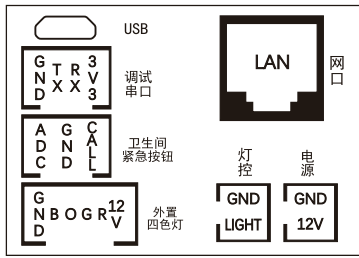

(BC2202L10-D)

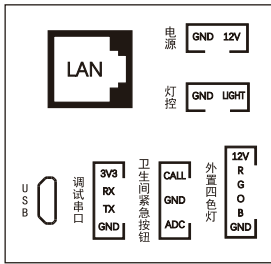


(BC2223L10-D)

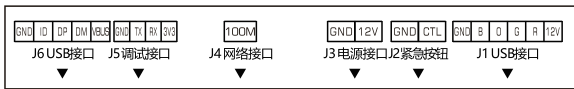

(BC222AL16-D BC222AL16-DM)



(BC2221L10-V/D BC2221L10-D)

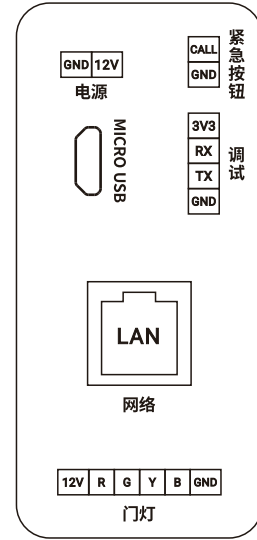

(BC2201L10-V)

五、技术参数

产品型号	BC2202L10-D	BC2223L10-D BC2221L10-V/D BC2221L10-D BC2201L10-V	BC222AL16-D BC222AL16-DM
供电电压	DC12V	DC12V	DC12V
最大功耗	10W	10W	20W
工作温度	-10°C to 50°C	-10°C to 50°C	0°C to 50°C
工作湿度	10% to 95%	10% to 95%	10% to 95%
联网接口	RJ45 10M/100M	RJ45 10M/100M	RJ45 10M/100M
安装方式	86盒安装	86盒安装/壁挂式安装	壁挂式安装
整机尺寸	BC2202L10-D: 241*191*14.8mm(外露) 241*191*22.8mm(整机)	BC2223L10-D: 280*156*14.6mm(外露) 280*156*22.6mm(整机) BC2221L10-V/D/BC2221L10-D: 358*180*30mm BC2201L10-V: 285.5*177.5*26mm	BC222AL16-D BC222AL16-DM: 417*226*22.5mm

六、故障分析与排除

如系统不正常,断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因,请通知代理销售商或厂家,不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

简单故障排除表

序号	故障描述	原因分析	排除方法
1	屏幕无显示,触摸屏可点亮屏幕	设备进入待机状态或接错	通过护士站软件下载亮屏时间区间
2	设备时间不同步(不正确)	护士站软件没有打开	在护士站的电脑上打开护士站软件,并保持运行状态
3	数模系统无法接听病床呼叫	数模系统中无法接听当前病房下的病床分机发起的呼叫	换一个其它房分机即可接听

为维护您的权益,请您认真填写,并妥善保管,作为维修时的凭证:

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
	销售日期	
用户信息	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	